

w wellion®

Vaša RAKÚSKA značka pre zdravie

**SPRÁVNE MERANIE
HLADINY GLUKÓZY V KRVI**



THE MEDICAL SERVICES COMPANY



- VEĽKÉ ČÍSLICE
- OZNAČENIA JEDLA
- JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

Správne uloženie zariadenia

- Dbajte na skladovaciu teplotu
- Dbajte na prevádzkovú teplotu

Ak teplota okolia nespadá do rozmedzia prevádzkovej teploty merača, musíte počkať, kým sa nedosiahne prevádzková teplota (približne 30 minút).

1. Príprava

- Pripravte si merač a testovacie prúžky **PRED** odberom krvnej vzorky.



2. Čistota

- Starostlivo si umyte a osušte ruky
- Použite čisté a suché miesto vpichu



3. Pripravte si lancetové zariadenie

- Odskrutkujte prispôsobiteľný kryt




wellion®
LUNA*trio*



- TLAČIDLO VYSUNUTIA
- BEZ KÓDOVANIA
(MERANIE GLYKÉMIE)
- FUNKCIA NAVYŠE:
MERANIE HLADINY
CHOLESTEROLU V
KRVI



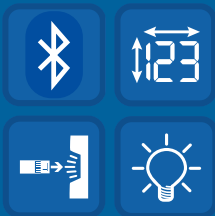

- FUNKCIA BLUETOOTH
- OSVETLENÝ VSTUP NA TESTOVACIE PRŮŽKY
- VEĽKÉ ČÍSLICE
- PODSVIETENÝ DISPLEJ

- Vložte lancetu
- Odskrutkujte ochranný kryt lancety



- Znova naskrutkujte prispôsobiteľný kryt
- Nastaviť hĺbku vpichu (1 = najmenšia hĺbka, 10 = najväčšia hĺbka)




- Potiahnite kryt na končeku, kým nezačujete kliknutie
- Spúšťacie tlačidlo je teraz červené



4. Pripravte si testovací proužek

- Dbajte na **dátum expirácie** testovacieho prúžka
- Dbajte na **skladovacu teplotu**
- Nádobku s testovacími prúžkami zatvorte **IHNEĎ** po vybratí testovacieho prúžka
- **NEPOUŽÍVAJTE** vlhké či poškodené testovacie prúžky, ani testovacie prúžky, ktorým uplynul dátum expirácie
- **NEDOTÝKAJTE** sa testovacích prúžkov mokrými alebo špinavými rukami
- **NEDOTÝKAJTE SA** končeka testovacieho prúžka, ktorý je určený na vzorku krvi

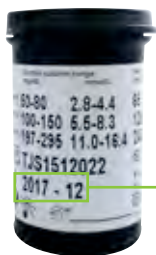

Dátum expirácie



Skldavacia teplota



wellion®
LEONARDO



- **BEZ KÓDOVANIA**
- **FUNKCIA NAVYŠE: MERANIE HLADINY KETÓNOV V KRVÍ**
- **OSVETLENÝ VSTUP NA TESTOVACIE PRÚŽKY**



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

wellion®
1SHOT



**POSILNENIE
ENERGIE S
PRÍCHUŤOU**



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

5. Vložte testovací proužek

- Vložte testovací proužek
- **NEDOTÝKAJTE SA** končeka testovacieho prúžka, ktorý je určený na vzorku krvi



6. Nasatie krvi

- Pritlačte lancetové zariadenie na želané miesto vpichu
- Stlačte spúšťacie tlačidlo na vpichnutie



7. Vykonajte meranie

- Priložte konček testovacieho prúžka ku kvapke krvi
- Kvapka krvi sa automaticky nasaje
- Podržte konček testovacieho prúžka v kvapke krvi, kým nezačujete pípnutie
- Pípnutie = množstvo krvi je dostatočné na vykonanie merania
- Výsledok sa zobrazí po 6-sekundovom odpočítavaní
- Použité testovacie prúžky odstráňte a správne ich zneškodnite.



wwellion®
WAVE

Tlakomer na zápästie



wwellion®
WAVE plus

Tlakomer na rameno



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

wellion
CALLA mini



NO
CODE



- **BEZ KÓDOVANIA**
- **MALÝ A PRAKTICKÝ**
- **VEĽKÉ ČÍSLICE**



8. Interpretácia výsledkov

- Ideálna hladina glukózy v krvi u dospelých, ktorí netrpia diabetom, je:
 - Menej ako 100 mg/dl (5,6 mmol/l) pred jedlom
 - Menej ako 140 mg/dl (7,8 mmol/l) po jedle ⁽¹⁾

- O ideálnej hladine pre Vás sa porozprávajte s Vaším lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom.

- „HI“ = hladina glukózy v krvi môže byť vyššia ako 600 mg/dl (33,3 mmol/l)
- „LO“ = hladina glukózy v krvi môže byť nižšia ako 20 mg/dl (1,1 mmol/l)
- Zopakujte meranie z končeka prsta. Ak je výsledok znova rovnaký, poraďte sa s Vaším lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom.

Referencie:

(1) American Diabetes Association Position Statement: Standards of Medical Care in Diabetes, 2010. Diabetes Care, 2010, 33 (Suppl. 1): 11–61.

9. Starostlivosť o Váš merač a uchovávanie merača

- Ak sa merač zašpiní, použite vlhkú (NIE MOKRÚ) handričku, ktorá nepúšťa vlákna, namočenú v roztoku jemného čistiaceho prípravku.
- Dbajte, aby do merača neprenikla voda. Merač nikdy neponárajte do vody, ani ho nedržte pod tečúcou vodou.
- Na merač nepoužívajte čistiace prípravky na sklo alebo pre domácnosť.
- Nesnažte sa čistiť otvor na testovací prúžok.
- S meračom zaobchádzajte opatrne. Pri otrase (napr. ak merač spadne) by sa mohli poškodiť elektronické súčiastky.
- Dbajte na prevádzkovú teplotu merača a testovacích prúžkov.
- Merač neuchovávajte na mimoriadne horúcich alebo chladných miestach (napr. pri zdroji tepla alebo v rozpálenom/mimoriadne chladnom aute).
- Merač a testovacie prúžky neuchovávajte ani nepoužívajte na veľmi vlhkých miestach (napr. v kúpeľni alebo v kuchyni).
- Uzáver nádoby s testovacími prúžkami zatvorte vždy ihneď po vybratí testovacieho prúžka a uistite sa, že je pevne uzavretý.
- Merač nerozoberajte. Zanikla by tak záruka. Ak máte technické problémy alebo otázky, kontaktujte autorizovaného predajcu.

wwellion®
Skin Care Cream



- **S 10% UREY
PRE OBZVLÁŠŤ
INTENZÍVNU
STAROSTLIVOSŤ**
- **CHRÁNI PRED
SUCHOU POKOŽKOU**



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

wellion®

FRIGO

MED COOLER BAG



UCHOVÁVAJTE
SVOJ INZULÍN
V CHLADE!



ANTIBAKTERIÁLNY

Špeciálna antibakteriálna impregnácia vnútorného vrecka



BEZ NAPÁJANIA NA ZDROJ ENERGIE

Aktivuje sa studenou vodou, nie je potrebný zdroj napájania



BEZ MRAZNIČKY

Nie je potrebná mraznička ani žiadny chladiaci prvok

RÝCHLO A JEDNODUCHO

Art.Nr. WELLFRIGOL
Art.Nr. WELLFRIGOXXL

FRIGO L 21 x 11 cm

FRIGO XXL 22 x 19 cm

wellion®

INVERTNÝ CUKROVÝ SIRUP



10 vrecúšok
cca 12-15g/vrecúško



ca. 40 g

GOLD



ca. 15 g

1SHOT

ORANGE

s pomarančovou príchuťou

s vanilkovou príchuťou



POSILNENIE ENERGIE

Okamžité a dlho pôsobiace posilnenie energie s tromi typmi cukru (glukóza, fruktóza, sacharóza)



IDEÁLNY PRI ŠPORTOVANÍ

Dokáže sa rýchlo absorbovať aj pri suchých ústach.



Wellion ORANGE
Wellion GOLD
Wellion 1SHOT

Art.Nr. WELL001
Art.Nr. WELL002
Art.Nr. WELL003

Všetky výhody Wellion Klubu GRÁTIS!

Jednoducho vyplňte registračnú kartu na poslednej strane a pošlite ju na adresu MED TRUST Slovakia

Výhody členstva vo Wellion klube:

- **Glukomer zdarma pri registrácii**
vrátane 10 ks testovacích prúžkov
- **Vernostný darček Wellion pre členov – naše ďakujem**
Pošlite nám 8 ks uzáverov z krabičiek testovacích prúžkov (Wellion LEONARDO/NEWTON/LUNA/MED TRUST Light bal.50ks) s viditeľnou šaržou & dátumom spolu s vašou adresou a vybraným darčekom. Vyberte si svoj darček:
Invertný cukor GOLD alebo 1SHOT, alebo Wellion krém
- **Naša online non stop ponuka www.wellion.sk**
Videá ku produktom, Manuály/príručky na stiahnutie, Informačné články o zdraví, Wellion Klub
Vaše zdravie je našim záujmom!
- **Osobné poradenstvo & servis zdarma – naša silná stránka už viac než 20 rokov**
 - Náhradné batérie do vášho glukomera raz ročne zdarma
 - Zdarma denník diabetika
 - Radi vám zodpovieme vaše otázky a osobne vám poradíme
- **Karta diabetu = klubová karta Wellion Klubu**
vo formáte praktickej karty (anglicky/slovensky)



Príhlasenie do Wellion KLUBU

O ÁNO, chcem sa stať bezplatne členom Wellion KLUBU a využívať mnohé výhody členstva. Pošlite mi, prosím, ZDARMA ako darček na privítanie môj vybraný glukomer. (Na zadnej strane označte prístroj, ktorý si želáte, a vyplňte celú kartu)

Meno _____

Príezvisko _____

Ulica _____

PSČ / obec _____

E-mail (na zaslanie špeciálnych ponúk) _____

Dátum narodenia _____

Súhlasím s tým, aby MED TRUST Slovakia s.r.o. si uložila a využívala moje údaje vrátane údajov týkajúcich sa zdravia a by ma poštou, telefonou, e-mailom informovala o výrobkoch a službách MED TRUST Slovakia s.r.o. Môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať telefonicky, e-mailom alebo osobne. Telefón: +421 911 374 734, office@medtrust.sk, MED TRUST Slovakia s.r.o., Popradská 80, 821 06 Bratislava

Dátum, podpis _____



Nie je potrebné nalepiť známku



Tel.: +421 911 374 734

Odpovedná karta

MED TRUST Slovakia s. r. o.
Popradská 80
821 06 Bratislava

WELL14SK-20240701


wellion® *Club*

Zaregistrujte sa teraz ZDARMA
a bez záväzkov do Wellion Klubu
a užívajte si množstvo výhod členstva vo
Wellion Klube.

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ ONLINE NA
www.wellion.sk/wellion-club

Vyberte si ZDARMA jeden z glukomerov Wellion ako
darček na privítanie (zaškrtnite políčko).

Bližšie informácie o týchto glukomeroch nájdete na www.wellion.sk.

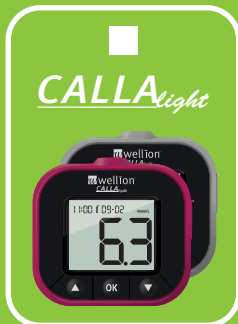

Pozrite si aktuálne všeobecné podmienky klubu Wellion, naše Vyhlásenie o
ochrane osobných údajov a prehľad výhod klubu Wellion na www.wellion.sk

wellion®



Vaša RAKÚSKA
značka pre zdravie

Sme tu vždy pre Vás!

Tel.: +421 911 37 47 34

www.wellion.sk



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

MED TRUST Slovakia s r. o.

Popradská 80

821 06 Bratislava

Tel.: +421 911 374 734

office@medtrust.sk · www.wellion.sk